

ANALIZATOR HbA1c model DCA 2000 SIEMENS-GJERMANI

Ne menyre te thjeshte merret mostra dhe vendoset brenda ne kaseten e kitit.

1. Merrni 1 μ l/40 μ l moster .
Moster gjaku per HbA1c ose moster urine e rastesishme per mikroalbuminen/kreatininen.
2. Vendosni tubin me moster brenda dhomes se kasetes.
3. Regjistroni llojin e analizes duke e rreshqitur kaseten nga lart .
4. Vendosni kaseten e kitit ne dhomen e aparatit. Largoni filmin plastik nga kasete qe te filloje matja. Mbyllni kapakun e dhomes.
5. Shfaqet perfundimi i analizes ne ekran per HbA1c ose vlerat e albumines, kreatinines dhe fraksioni. Perfundim dhe dalje e rezultateve ne me pak se 15 minuta.

Vlerat normale te HbA1C 4.2% - 6.2%

DCA 2000 + I AFROHET ME SE MIRI PRETENDIMEVE TUAJA PER LEHTESI, THJESHTESI DHE BESUESHMERI.

DCA-2000 I JEP MUNDESI MJEKESISE KLINIKE TE PERCAKTOJE ME SAKTESI HEMOGLOBINEN E GLIKOLIZUAR (HbA1c) ME NJE MENYRE SHUME TE THJESHTE DHE TE SHPEJTE.

Rezultati i HbA1c per pak minuta.

- ❖ Ndhmoni pacientet tuaj te mbajne glukozen ne nivelin e duhur.
- ❖ Matje sasiore e HbA1c per 6 minuta te gjakut kapilar.
- ❖ Kosto e ulet e analizes.
- ❖ Metoda e antitropave monoklonik siguron saktesi dhe perseritshmeri.
- ❖ Metodot krahasuese treguan perqindje te larte (99%) me metoden HPLC
- ❖ Matje te qendrushme – ndryshueshmeri me pak se 5%.

