



Ves-Matic Easy

- Karakteristika

- Random acces
- Eritrosedimentmeter automatik deri ne 10 mostra
- Rezultat ne 20 min
- Kosto te ulet
- I sigurt
- Kerkon vetem 1 ml gjak
- Bazuar ne metodat ICSH-Westergren's
- Integrohet me sistem kompjuterik

- Specifikime teknike

- Sistemi i leximit : Sensor infrared
- Ekran LCD me 16 karaktere per linje
- Porte USB per lidhje HOST
- Permasat (15x15x22cm)
- Pesha: 1.5 kg
- Power Supply i jashtem IN 100/240 VAC OUT 9VDC
- Barcode reader i jashtem (opsional)

- Funksioni i tastieres

- Tastiera e Ves-matic perbehet nga kater (4) butona dhe nje menu shume te thjeshte
- UP /DOWN - kane funksion per nderrimin e menuse se instrumentit.
- OK- Buton i cili konfirmon menune
- L/R- Buton i cili kontrollon printerin
- UP and OK -Duke i mbajtur shtypur keta butona instrumenti anulon nje veprim te marre me perpara, psh.anulimin e procesuit te matjes se analizës.

- Marrja e mostres

Kryhet ne gjak venoz dhe brenda 30 sek. gjaku ne shiringe pasi eshte marre nga pacienti hidhet ne tubat Vacu-Test deri tek shenja e tubit (rreth 1ml gjak)

- Pasi kemi ndezur aparatit presim sa te shfaqet menuja kryesore,(Select function)
- Per te kryer analizen eritrosedimentin ora e pare,levizim ne menu me ane te butonave me shigjeta larte dhe poshte tek menu ERS I dhe shtypim OK (marrim rrezultatit per 20 min)
- Per te kryer analizen eritrosedimentin ora e dyte ,levizim ne menu me ane te butonave me shigjeta larte dhe poshte tek menu ERS II dhe shtypim OK (marrim rrezultatit per 40 min)
- Per te riprintuar rrezultatit shkojme tek menuja PRINTER ARCHIVE dhe japim komanden print last result